

再使用禁止

TP モーラーチューブ

**【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金
又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往
歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

再使用禁止

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象:掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎な
どの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症
することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避
けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室
温で保管すること。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造、寸法

多種多様のためカタログ等参照

(2) 原理

本品は、歯列矯正において上下顎大臼歯のバンドに付着
又は歯に直接接着させて使用される金属製チューブであ
る。

(3) 原材料

本品は次の原材料及び成分で構成する。

原材料:ステンレス鋼

成分名:炭素、ケイ素、マンガン、リン、イオウ、
ニッケル、カリウム、モリブデン、鉄

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

歯列矯正用ワイヤ等をはめ込み、歯の正しい配列状態の確
保に用いること。

【使用方法等】

バンドに付着又は歯に直接接着させて用いる。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、
使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ(コンバーチブルタイプの
キャップも含む)、脱落し口腔内を傷つけることが
あるので使用には十分注意すること。また、その際に
誤飲、怪我がないようにすること。