

## 再使用禁止

## TP エラストマー

### 【禁忌・禁止】

- ・本成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本品は再使用しないこと。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

#### (1) 形状



mini スティック  
リガチャータイ

カラーセル リガ  
チャードispensenser

E・チェーン

#### (2) 構造

リング状になっており、フックなどに引っ掛けて使用する。

#### (3) 原理

フックなどに引っ掛けて使用し、エラストマーが元に復元しようとする力が歯の移動を行う。

#### (4) 原材料

本品は以下の原材料で構成する。

原材料：ポリウレタン、着色材（黄銅、酸化チタン、黒酸化鉄、アルミニウム末、カーボンブラック、法定色素）

### 【使用目的又は効果】

弾性材料で歯の移動、矯正装置の保持等に用いる。

### 【使用方法等】

ブラケットもしくはチューブ等のフック、又は直接ブラケットに引っ掛けて空間隙等に使用する。また、ケインやストレートシューターガンで取り付けるものもある。

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。  
またその際に誤飲、怪我、虫歯等無きようにすること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

#### (2) 有効期間

外観及び形状を使用者が確認の上、適切な治療に問題ないと判断される状態を保てる期間内に使用すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### (1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

#### (2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国