

TP ピンセット

**【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状：代表的写真



(2) 構造

本品の全体の大きさは手で握りやすいサイズになっている。先端部は先細になっており、カーブになっているものもある。また、空いているものと自然に閉じているものがある。付属品のチップを用いるものもある。

(3) 原理

2枚の先端部を近接させて（閉じて）、歯列矯正用材料を保持する。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

本体：ステンレス鋼、

チップ：ポリエーテルエーテルケトン

【使用目的又は効果】

本品は用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いるものをいう。

【使用方法等】

使用目的に対応する器具を選択する。必要に応じてチップを装着する。ハンドル部を持ち2枚の先端部を閉じ、口腔内に適用するブラケット等の歯列矯正用材料をつかみ保持する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

チップの脱離・誤飲等に注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

① 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した汚れは直ちに除去・洗浄すること。洗浄の際、金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避けること。

② 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。

③ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

④ 清掃液・消毒剤・滅菌器については、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量や各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。

⑤ 錆びている器具と一緒に保管しないこと。

⑥ 器具の先端部は繊細な構造をしているため、無理な角度、過度の加圧、落下、強い衝撃等を避け使用・保管すること。

⑦ 腐食性薬剤での本品の洗浄はしないこと。

苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性、洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国