

リトラクター

**【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

- ・ 本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

〈使用方法〉

- ・ 加熱処理はしないこと。[本品は非耐熱性製品である]

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状: 代表的写真



フレックスリトラクター

(2) 構造

本品の大きさは手でにぎりやすいサイズであり、プラスチックからなり、手で持つためのハンドル部と、口角・口唇を圧排する部分からなる。

左右片側を圧排する構造のものと、両側を圧排する構造のものがある。

(3) 原理

本品は、患者の開口状態を保持し、口角、口唇を圧排することにより、歯列状態を見やすくし、治療操作を行いやすくする補助器具である、

口腔内写真撮影時、審美指導、ブリーチング時、矯正治療のブラケット装着時等に、歯列を見えやすくし、操作をしやすくする。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

原材料: ポリカーボネート、ポリエステル

【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持し、口角・口唇を圧排する。

**【使用方法等】

使用用途、患者の口腔状態にあわせて、リトラクターを選択する。

器具の向きを確認し、片側の口角へ挿入し、挿入した部分が外れないように抑えながら、反対側の口角に挿入し、口唇部分に被らせるようにして装着する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用中を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので、使用の際は患者の開口状態が正しく保持されているか注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- ① 腐食性薬剤での本品の洗浄はせず、アルコールなどの中性洗浄剤を使用すること。
苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性、洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。
- ② 再使用する際には、付着物を除去した後、非加熱滅菌(ガス滅菌、紫外線滅菌、薬液滅菌)を推奨する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国