

ストレートシューター

【警告】

本器具の使用時及び解体時に、患者を含めた周囲の者は、目の保護具の着用等適切な目の保護を行うこと。

[エラスティックリング・部品等が飛び出し、目に深刻なダメージを与える可能性がある。]

**【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状



(2) 構造

本品の全体の大きさは手で握りやすいサイズになっている。

独特の構造をしており、ハンドルを開いた状態でエラスティックリングを保持することができる。ハンドルを絞ることにより、エラスティックリングが拡張し、プランジャーが押し出される。エラスティックリングが適切な位置にある時に、ハンドルを最大まで絞り、プランジャーを完全に伸ばすと、エラスティックリングがワイヤーフィンガーから外れてブラケットのウィングにはめ込まれ装着される。

(3) 原理

ワイヤーフィンガー先端部に歯列矯正用材料（エラスティックリング）を保持し、手でハンドルを絞ることにより、エラスティックリングが拡張しプランジャーが押し出されるため、矯正ブラケット、チューブ等に装着することが可能である。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

原材料：ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン

**【使用目的又は効果】

エラスティックリングを保持し、歯列矯正用ブラケット、チューブ等に装着するために用いる。

**【使用方法等】

- ① ワイヤーフィンガー先端部に、エラスティックリングを装着する。
- ② 目的とする装置の前へ、ストレートシューターを移動する。
- ③ エラスティックリングが適切な位置にあることを確認し、ハンドルを最大まで絞り、プランジャーを完全に伸ばす。
- ④ エラスティックリングが、適切に装着されていることを確認する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

(2) 保管の条件

錆びている器具と一緒に保管しないこと。

****【保守・点検に係る事項】**

- ① 再使用の際には、付着物の除去・洗浄を行い、オートクレーブや乾熱滅菌、または薬剤による消毒を行うこと。
- ② 本品の洗浄・消毒の際は、中性洗浄剤を推奨する。
塩素系、アルカリ性、酸性又反応性フッ素入り化合物を含む溶液は使用しないこと。
- ③ 洗浄、消毒、滅菌には、可能な限り精製水を使用すること。水道水の使用は、塩素イオンの影響で器具が腐食する可能性がある。
- ④ 洗浄後は、腐食防止のためにすみやかに乾燥すること。
- ⑤ 適切な洗浄・乾燥が行われていない場合、オートクレーブ・乾熱滅菌により悪影響を及ぼす可能性がある。
- ⑥ 乾熱滅菌では、30分以上の処理を行う場合には、設定温度が191℃を超えないこと

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国