

バンドプッシャー

**【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状



ヒートレジストバイトスティック



バンドプッシャー

(2) 構造

- ① 本品の全体の大きさは手で握りやすいサイズになっている。
- ② ヒートレジストバイトスティックは、チップと本体からなり、チップをバンドの辺縁に合わせ、本体を患者に噛ませることにより、バンドを歯牙に適合させる。チップの形状は、正三角形で、咬合面には、刻みがついている。
- ③ また、ステンレス鋼と耐熱性素材から構成されるため、210℃までの高温に耐えることが可能である。オートクレーブや乾熱滅菌の使用が可能である。カセットの使用は、必要としない。
- ④ バンドプッシャーは、先端が独特の構造をしており、表面に刻みがついているため、帯環やリガチャーワイヤーの結び先端部の圧接に適している。

(3) 原理

本品は、歯牙への金属帯環の試適及び装着に用いる歯科用器具である。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

ヒートレジストバイトスティック：ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン

バンドプッシャー：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、金属帯環（バンド）を歯の位置に合わせ、適合させるために用いる歯科手用器具である。

**【使用方法等】

- ① 使用前に器具を点検し、異常がないことを確認する。
- ② バンドを歯牙に装着する。
- ③ バンドプッシャーの場合、ハンドルをしっかり握り、先端部に指を添え、キザミの付いた部分で力を加えたい部分に当て、適度な力で圧接する。
バイトスティックの場合、バンドの辺縁にチップを合わせ、適正な位置にあることを確認し、患者に噛ませる。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② すべりや誤操作により、周辺組織の損傷や製品の破損が生ずる可能性がある。取扱いには十分、注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- ① 再使用する際には、付着物を除去し、洗浄を行いオートクレーブ又は乾熱滅菌により滅菌若しくは薬剤による消毒を行うこと。
- ② 洗浄、滅菌、消毒には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがあること。
- ③ 薬液消毒を行う際には、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがあること。
- ④ 洗浄後は、腐食防止のためにすみやかに乾燥すること。
- ⑤ 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ⑥ 適切な洗浄・乾燥が行われていない場合、オートクレーブ・乾熱滅菌により悪影響を及ぼす可能性があること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国