

## 印象採得用トレー

### \*\*【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状

代表的写真



Extend-0 トレイ

Extend-0 トレイ、Norm-0 トレイの2種類がある。

Extend-0 トレイには、メタルタイプとカラータイプがあり、Norm-0 トレイはメタルタイプである。

種類：上顎用 サイズ1～8 下顎用 サイズ1～8

#### (2) 構造

印象材を盛り、保持し、圧接するトレー部分と、保持するためのハンドル部分からなる。

トレー部分は、印象材の脱落防止のため、穴が開いた構造になっており、全顎用の印象採得に用いる。

ハンドル部分に、サイズを示す数字が刻まれている。

アルミニウム合金で制作されており、調整しやすくなっており、表面をコーティング材（テフロンまたはハイブリッド樹脂）によって、コーティングされているものと、コーティングされていないものがある。

加熱処理が可能な素材であり、オートクレーブ、乾熱滅菌、薬剤消毒等の適切な滅菌・消毒を行うことにより再使用可能である。

#### (3) 原理

本品は、印象採得時に印象材をもり、保持し、圧接するために用いる器具である。

#### (4) 原材料

本品は、次の原材料で構成する。

原材料：アルミニウム合金、コーティング材  
(テフロン、ハイブリッド樹脂)

### 【使用目的又は効果】

本品は、印象採得時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

### \*\*【使用方法等】

- ① 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯列に圧接する。
- ② 印象材の硬化後、口腔内から取り出す。

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ② 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ③ 本品は、未滅菌品であるため、使用前には必ず洗浄・薬液消毒・滅菌等の適切な処置を行うこと。
- ④ 顎形態に合わせて本品を調整する際、急に曲げたり、過度に加圧・変形させるとコーティングが剥がれたり、破損する場合があるため、取扱いに注意すること。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

- ① 本品の使用後は、付着物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ず手袋を着用すること。
- ② 薬液消毒を行う際には、中性洗浄剤を推奨する。腐食性薬剤、アルカリ・酸又は反応性フッ素化物を含む液は、トレーにダメージを与える可能性があるため、使用しないこと。また、洗浄後は十分に薬液を洗い流すこと。
- ③ 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ④ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

錆びている器具と一緒に保管しないこと。

\*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国