

再使用禁止

Solay トレイ

**【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の

既往歴のある患者には使用しないこと。

＜使用方法＞

再使用禁止

【使用目的又は効果】

印象採得時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

**【使用方法等】

- ① 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯列に圧接する。
- ② 印象材の硬化後、口腔内から取り出す。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

代表的写真



Solay トレイ サイズ2

使い捨てタイプの印象用トレーである。

種類：上顎用 サイズ1～4 下顎用 サイズ1～4

(2) 構造

印象材を盛り、保持し、圧接するトレー一部分と、保持するためのハンドル部分からなる。

トレー部分は、印象材の脱落防止のため、穴が開いた構造になっており、全顎用の印象採得に用いる。トレー内面には、エッチングが施されており、印象材を保持しやすくなっている。

本品は、ABS樹脂からなり、使い捨てタイプのトレーである。

(3) 原理

本品は、印象採得時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

(4) 原材料：ABS樹脂

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な場所に保管すること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国