

鉗子

**【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- ・ 本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

- ・ 腐食性薬剤での本品の洗浄
[苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。]

*【形状・構造及び原理等】

- (1) 形状:代表的写真



マッシュウタイニング
プライヤー

- (2) 構造及び原理

本品は用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いる。

- (3) 原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は用途に応じて様々な形状の先端部をもつ小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いるものをいう。

【使用方法等】

- ① 使用前に必ず洗浄・消毒・滅菌を行う。
- ② 使用用途に応じて、器具の先端部で目的物の保持・屈曲・切断を行う。

**【使用上の注意】

- (1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 器具の先端部は繊細な構造をしているため、無理な角度の加圧、落下、強い衝撃等を避け、使用・保管すること。

**【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

- (2) 保管の条件

錆びている器具と一緒に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

- ① 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した汚れは直ちに除去・洗浄すること。洗浄の際、金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避けること。
- ② 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ③ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。清掃液・消毒剤・滅菌器については、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量や各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

- (1) 製造販売業者
有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805
- (2) 製造業者
TP Orthodontics, Inc
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国