

ワックス用 スパチュラ

**【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・腐食性薬剤での本品の洗浄
[苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。]

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状



(2) 構造及び原理

本品はワックスパターン成形に用いるブレード部分と、ハンドル部分からなる。ブレード部分を加熱し、ワックスの軟化に用いることも可能である。

(3) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

ブレード: ステンレス鋼

ハンドル: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ワックスパターンを成形するために用いる歯科用器具であり、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

**【使用方法等】

- ① ハンドル部分を手で持ち、ブレード部分でワックスを成形する。
- ② ワックスを軟化させる場合には、ブレード部分を適切に加熱する。本品の加熱時には、火傷等、取り扱いに注意する。

**【使用上の注意】

- (1) 重要な基本的注意
本品の加熱時には、火傷等、取扱いに注意する。

*【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法
直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

- (1) 製造販売業者
有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805
- (2) 製造業者
TP Orthodontics, Inc
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国