

歯科用練成器具

**【禁忌・禁止】

- ・腐食性薬剤での本品の洗浄
[苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。]

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

代表的写真



セメント用 スパチュラ

(2) 構造及び原理

本品は印象材、及び石膏などの歯科材料を混和するために使用される。混和に用いるブレード部分とハンドル部分から構成される。

(3) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

ブレード部分: ステンレス鋼

ハンドル部分: ステンレス鋼、木材、ポリエーテルエーテルケトンのいずれかを用いる。

【使用目的又は効果】

歯科材料(印象材料、セメントなど)を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部分を手で持ち、ブレード部分で歯科材料を練和する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

使用後は、付着した材料等の汚れを拭取り、清潔に保つこと。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象: 掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

薬剤による消毒を行う場合、塩素系消毒剤は使用せず、アルコールなどの中性洗剤を使用すること。

清掃液・消毒剤については、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量や各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国