

## 石膏用 ナイフ

### \*\*【禁忌・禁止】

#### <使用方法>


- ・腐食性薬剤での本品の洗浄  
[苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性、酸性洗浄剤による本品の洗浄は、変色や腐食を生じる恐れがあるため使用しないこと。]

### \*\*【使用上の注意】

- (1) 重要な基本的注意
- ① 不適切な操作により破損することがあるので、使用には十分に注意すること。また、すべり等誤操作によるけが等に十分に注意すること。
  - ② 使用後は付着した材料等の汚れを拭取り、清潔に保つこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状

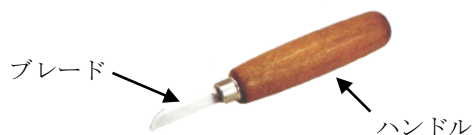

#### (2) 構造及び原理

本品は石膏を彫刻形成するために用いる。  
彫刻形成するブレード部分は、ステンレス鋼で作られている。ハンドル部分は、木材を用いている。

#### (3) 原材料

本品は次の原材料で構成する。  
ブレード：ステンレス鋼  
ハンドル：木材

### 【使用目的又は効果】

石膏を彫刻形成するために用いる。

### \*\*【使用方法等】

- (1) ハンドル部分を手で持ち、ブレード部分で石膏材を彫刻形成する。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

#### (2) 保管の条件

錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

- ① 洗浄・消毒には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食（錆）することがある。
- ② 洗浄後は、腐食（錆）防止のため直ちに乾燥すること。
- ③ 腐食（錆）の原因となるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。
- ④ 薬液消毒を行う際には、中性洗浄剤を推奨する。 清掃液・消毒剤については、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量や各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。

### \*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

#### (1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン  
TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

#### (2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc  
ティーピー オーソドンテックス社  
アメリカ合衆国