

タンガウェイ

**【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＜使用方法＞

・加熱処理

[耐熱性素材ではないため、熱湯に浸したり、オートクレーブ等の加熱処理を行わないこと。]

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

代表的写真



プラスチック
タンガウェイ

色素材を使用している製品としていない製品がある。

(2) 原理

患者に噛ませることにより、舌が出てくることを防ぎ、舌の圧排と保護を行い、周辺組織の検査、歯科治療を容易にする補助器具である。

患者に噛ませることにより、歯科治療中の患者の疲労が軽減される利点がある。

(3) 構造

器具の左右部分は、各1個ずつ穴が開いた構造になっており、フロス等を通して脱落・誤飲防止に用いたり、廃唾管を入れたり、設置と取り外しの際にプライヤー等でつかむことも可能である。

非耐熱性素材であり、オートクレーブ、乾熱滅菌等の加熱処理は不可である。

薬液消毒等の適切な滅菌・消毒を行い、感染に十分配慮して使用することにより再使用可能である。

本品の素材は全て、フタル酸フリーである。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

原材料：エチレン酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、色素材（青色、緑色、赤色素のいずれかを使用）

【使用目的又は効果】

本品は、舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査、歯科治療を容易にするために用いる器具である。

**【使用方法等】

- ① 安全のため、左右の穴の一方にフロス等のひもを通し、脱落による誤飲防止を行う。
- ② 患者の口腔内に器具を装着し、患者に噛ませることによって舌のブロックを行う。
- ③ 使用後は、必ず適切な洗浄、薬液消毒を行うこと。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で、破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので、使用には十分注意すること。また、その際、誤飲、怪我がないようにすること。

*【保管方法及び有効期間等】

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

- ① 薬液消毒を行う際には、薬剤の添付文書又は取扱説明書に書かれた使用上の注意を守ること。また、洗浄後は十分に薬液を洗い流すこと。
- ② 本品は、患者毎に洗浄・薬液消毒等を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ③ 本品の使用後は、付着物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ず手袋を着用すること。

*【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国