

ワックス ストリップス

**【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状：スティック状である。

ユーティリティワックスストリップの外観写真



ユーティリティワックスストリップとモータイトの2種類がある。

(2) 構造

棒状、白色である。加熱により、融解するため構造は規定しない。

(3) 原理

口腔内の印象採得用の補助材料をいう。ワックスを成分としており、印象採得用トレーの辺縁の不足部を補ったり、トレーの延長などに使用する。

(4) 原材料

本品は次の原材料で構成する。

原材料：パラフィンワックス又はブテン重合体、タルク、炭酸カルシウム、セルロース

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】

- ① 印象採得用トレーを口腔内に試適し、患者の歯列・口腔内状態を確認し、過不足のある部位を確認する。
- ② 適量を印象採得用トレーの辺縁に接着し、印象採得を行う。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で、はずれ、脱落することがあるので、使用には十分注意すること。また、その際、誤飲のないようにすること。
- ③ 本材は可燃性であるので、取扱いに十分注意し、使用の際には火傷に気をつけること。
- ④ 高温となる場所に放置しないこと。
- ⑤ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

**【保管方法及び有効期間等】

火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管はせず、高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）を避けること。

*【製造販売業及製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国