

再使用禁止

TP スプリングピン

**【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

ブラケットに挿入する足とワイヤーに掛けるフックとの間にコイル状のスプリング部分がある。

代表的写真:



反時計回り

サイドワインダースプリング

(2) 原理

ブラケットに足を挿入して固定し、フックをワイヤーに掛ける。アーチワイヤーがブラケットから外れることを防ぐ。また、バネの力により、歯を動かし矯正治療も行う。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成される。

原材料: ステンレス鋼

成分名: 鉄、クロム、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ

**【使用目的又は効果】

バネ状で矯正力を発生させるために用いること。

**【使用方法等】

ブラケットのパーティカルスロット(垂直の溝)に挿入し、テールのはみ出した部分をブラケットの周りに曲げ、アームをアーチワイヤーに引っ掛けて使用する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象: 掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国