

## 再使用禁止

## TP リンガルボタン

### \*\*【禁忌・禁止】

#### <適用対象(患者)>

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

#### <使用方法>

再使用禁止

### \*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状、構造

リンガルボタン・ラウンドベース



リンガルボタン・  
レクタングュラーベース



ワンピース・リンガルボタン

#### (2) 原理

本品はエラスチックゴム、結さつ糸、ワイヤー等を本品のフックに掛けて、歯の捻転、近遠心的移動、臼歯部交叉交合の矯正、埋状歯の開窓牽引等を行うための歯列矯正用金属製リンガルボタンである。

#### (3) 原材料

本品は次の成分で構成される。

原材料: ステンレス鋼

成分名: 鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ、モリブデン

### 【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

### \*\*【使用方法等】

#### (1) ボンダブルタイプ

本品を歯牙に直接ボンディングした後、必要に応じてエラスチックゴム、結さつ糸、ワイヤー等をフックに掛けて使用する。

#### (2) ウェルダブルタイプ

本品をバンドの適切な位置にろう着する。ろう着したバンドを歯牙に装着後、必要に応じてエラスチックゴム、結さつ糸、ワイヤー等をフックに掛けて使用する。

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。

#### (2) 不具合・有害事象

その他の有害事象: 掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### (1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン  
TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

#### (2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.  
ティーピー オーソドンテックス社  
アメリカ合衆国