

## 再使用禁止

## TP クリンパブルフック

### \*【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

〈使用方法〉

再使用禁止

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状、構造

クリンパブルフック

(タングステンタイプ)



クリンパブルストップ

(リブタイプ)



クリンパブルスペーサー



本品には、コーティングしている製品(エステティック)としていない製品がある。

#### (2) 原理

TPクリンパブルフックは、ワイヤーなどに取り付け、ワイヤーのスライド防止をすることにより、歯列矯正力を伝達する装置である。ワイヤーの太さに応じて使用するので大きさも多種多様である。

#### (3) 原材料

本品は次の原材料及び成分で構成する。

原材料: ステンレス鋼

キシラン(コーティング材)

成分名: クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ、キシラン

製品番号 226-010W, 226-020W, 226-009, 226-009W  
には上記成分の他に、鉄、モリブデンが配合されている。また、製品番号 226-010, 226-010W, 226-020, 226-020W にはタングステンカーバイドでエンボス加工を施している。

### 【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

### 【使用方法等】

専用プライヤーで保持し、そのまま口腔内へ持っていき、アーチワイヤーの必要な個所でクリンプする。フックの部分にエラスティックゴムやパワーチェーンを引っ掛けて使用する。

### \*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。また、その際は誤飲、怪我がないようにすること。
- ③ エステティック製品は、コーティング材が剥がれる場合があるので取扱いには十分注意すること。

#### (2) 不具合・有害事象

その他の有害事象: 掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### (1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン  
TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

#### (2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.  
アメリカ合衆国