

再使用禁止

TP ボンダブル リンガル リテーナー

**【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金
又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往
歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

アーチ型になっており、歯に接着する部分はメッシュ
形状になっている。



プリフォームド・ボンダブル・リンガル・リテーナー



リンガル・ボンダスプリント
リテーナー

(2) 原理

本品は、帯環等を使用して歯の移動を行った後、
歯牙に装着し、歯の後戻りを防ぐために保定する。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成される。

原材料: ステンレス鋼

成分名: 炭素、ケイ素、マンガン、リン、イオウ、
ニッケル、クロム、鉄、モリブデン

【使用目的又は効果】

前歯の安定や矯正の保定をすること。

【使用方法等】

歯に本品のメッシュベース部を接着し固定させる。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。またその際に誤飲や怪我に注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象: 掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL: 03-5961-3800 FAX: 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.
ティーピー オーソドンテックス社
アメリカ合衆国