

再使用禁止

TP リガチャーワイヤー

**【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。


<使用方法>

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

代表例

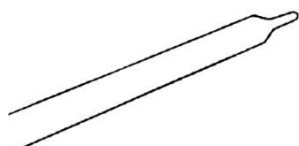

リガチャーワイヤー



リガチャーワイヤー
ツイストタイプ

本品には、リガチャーワイヤー、リガチャーワイヤーツイストタイプ、小林リガチャーワイヤー、リガチャーワイヤーコイルタイプの4種類に大別され、コーティングしている製品(トゥースカラー)と、していない製品(ステンレススチール)がある。

(2) 原理

本品は、歯列矯正用のステンレス鋼線であり、アーチワイヤーとブラケットを連結したり、歯間分離、顎間固定装置の結さつ固定などに使用される。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成する。

原材料：ステンレス鋼

成分名：鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ、キシラン(コーティング材)

【使用目的又は効果】

矯正用ワイヤをアタッチメントに連結、保持等をするために用いること。

【使用方法等】

適切な器具で、ブラケットとワイヤーを結さつし、余った部分は切断する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内で破折、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。
- ② 本品はコーティングが剥がれる場合があるので、取扱いには十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL : 03-5961-3800 FAX : 03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国