

## 再使用禁止

## TP ブラケット

### \*\*【禁忌・禁止】

#### ＜適用対象（患者）＞

本品の成分（ニッケルを含む）および類似成分の合金  
又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往  
歴のある患者には使用しないこと。

#### ＜使用方法＞

再使用禁止

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。

#### (2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状

代表的写真



ストレートエッジI  
アンドリュースシステム



ティップエッジプラス  
ブラケット

#### (2) 原理

本品は、バンドに付着させたり歯牙に直接接着させて、帯環と金属線を使用して歯の移動を行う歯列矯正用のブラケットである。

#### (3) 原材料

本品は次の原材料及び成分で構成する。

原材料：ステンレス鋼

成分名：鉄、クロム、ニッケル、モリブデン、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### (1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン  
TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

#### (2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.  
ティーピー・オーソドンテックス社  
アメリカ合衆国

### 【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

### 【使用方法等】

バンドに付着させたり、歯に直接接着させて帯環と金属線を使用して歯の移動を行う。