

再使用禁止

TP リップバンパー

**【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

本品の成分（ニッケルを含む）および類似成分の合金
又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往
歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

U字型になっており、両先端はチューブなどを通して
使用される。



犬歯用ループ付き



犬歯用ループなし

(2) 原理

本品は下口唇の過度の筋力が歯列に加わらないようにす
るためのステンレス鋼線であり、上下前歯部と下口唇の
間に介在させて使用される。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成される。

原材料：ステンレス鋼、ナイロン、銀ろう

成分名：鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、
炭素、リン、イオウ、ナイロン11（コーティ
ング材）、銀、銅、亜鉛、スズ

【使用目的又は効果】

口唇の力を利用して歯牙の移動を制御すること。

【使用方法等】

歯牙、歯面に取り付けられているチューブなどにリップバンパー
の両端部分を左右に挿入する。リゲーションフック付きの場合
は結さつ材料を使用してフック部とチューブをつなげる。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止
し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることが
あるので使用には十分注意すること。
- ③ 本品はコーティングが剥がれる場合があるので、取り扱い
には十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科
金疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気
の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよ
う室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国