

再使用禁止

TP パット付きリップバンパー

**【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

本品の成分（ニッケルを含む）および類似成分の合金
又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往
歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

再使用禁止

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

U字型になっており、両先端はチューブなどを通して使用される。



リップバンパー(フックなし) リップバンパー・プラス

(2) 原理

本品は下口唇の過度の筋力が歯列に加わらないようにするためのステンレス鋼線であり、上下前歯部と下口唇の間に介在させて使用される。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成される。

原材料：ステンレス鋼、ナイロン、銀ろう

成分名：鉄、クロム、ニッケル、マンガン、ケイ素、炭素、リン、イオウ、ポリプロピレン（パット部）、銀、銅、亜鉛、スズ

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

下口唇の過度の筋力が歯列に加わらないようにすること。

【使用方法等】

歯牙、歯面に取り付けられているチューブなどにリップバンパーの両端部分を左右に挿入する。フック付きの場合は結さつ材料を使用してフックとチューブをつなげる。