

再使用禁止

TP ジングスリング

**【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＜使用方法＞

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

3種類あり、スリップフリージング・オー・ストリングとバンパースリーブチュービングはパイプ状になっている。



スリップフリージング・
オー・ストリング



バンパースリーブ
チュービング

(2) 原理

本品はエラストマーの弾性を利用する。ストリングをフックなどに引っ掛けて使用し、エラストマーが元に復元しようとする力が捻転歯の回転、歯間の閉鎖をさせる。また、チューブにワイヤーを挿入して使用することによって、ワイヤーが頬粘膜に直接当たらないようにする。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成する。

原材料：ポリウレタン

成分名：ポリウレタン

着色原料（カーボンブラック、黒酸化鉄、酸化チタン）

【使用目的又は効果】

歯の移動又は維持のために歯に力を加えること。

【使用方法等】

フックなどに結んで取り付ける。

バンパースリーブはワイヤーに通して使用する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内ではずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象：掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光及び高温を避け、室温が一定の場所で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL：03-5961-3800 FAX：03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.
ティーピー オーソドンテックス社
アメリカ合衆国