

再使用禁止

TP リフレックス コイル スプリング

**【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

本品の成分(ニッケルを含む)および類似成分の合金又は配合成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＜使用方法＞

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

バネ状で、ダブルコイルタイプ、オープンコイルタイプ、両端にアイレットが付いたクローズドコイルタイプの3種類がある。また、一部にコーティングしたタイプがある。

①ダブルコイルスプリング



②オープンコイルスプリング

(非コーティング)



(コーティング)



③クローズドコイルスプリング



(2) 原理

本品は、両端をブラケットやチューブなどに掛け、バネの力により歯を移動させる歯列矯正用コイルスプリングである。

(3) 原材料

本品は次の成分で構成する。

原材料:ニッケルチタン合金

成分名:ニッケル、チタン、キシラン(コーティング材)

**【使用目的又は効果】

コイルスプリングの弾性を利用し、矯正力を発生させ歯牙を正常な位置に移動する。

**【使用方法等】

ダブル及びオープンコイルタイプは、アーチワイヤーを通す。アクチバートして広げたい箇所挿入する。

クローズドコイルタイプは、アイレットをブラケットのフックなどに引っ掛けてバネの力により歯を移動させる。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内でハセツ、はずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。
- ③ 本品はコーティング材が剥がれる場合があるので、取り扱いには十分注意すること。

(2) 不具合・有害事象

その他の有害事象:掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがある。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

凍結、高温・多湿、直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー オーソドンテックス社

アメリカ合衆国