

再使用禁止

TP ラテックス エラスティックス

**【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

本品の成分(天然ゴム)に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

〈使用方法〉

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状



プレーンラテックス



カラーラテックス

(2) 構造

リング状になっており、プレーンラテックス エラスティックスとカラーラテックス エラスティックスの2種類の製品からなる。

(3) 原理

本品は歯列矯正用エラスチック(輪ゴム)であり、ゴムの弾性力を利用して、歯や歯列弓の移動に使用される。

(4) 原材料

本品は次の成分で構成する。

原材料:天然ゴム

成分名:天然ゴムラテックス、イオウ、酸化亜鉛、ステアリン酸、N-t-ブチル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン重合体、法定色素(赤色3号又は黄色4号又は緑色3号又は青色2号又は褐色201号又は黒色401号)

【使用目的又は効果】

弾性材料で歯の移動、矯正装置の保持等に用いる。

**【使用方法等】

患者自身(術者も含む)でブラケットもしくはチューブ等のフック、または直接ブラケットに引っ掛けて空隙閉鎖等に使用する。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内ではずれ、脱落し口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。また、その際に誤飲、怪我、虫歯等無きようにすること。

*【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光や水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないよう室温で保管すること。

(2) 有効期間

外観及び形状を使用者が確認の上、適切な治療に問題ないと判断される状態を保てる期間内に使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン
TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.
ティーピー・オーソドンテックス社
アメリカ合衆国