

再使用禁止

TP エラストマー

**【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉

本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

〈使用方法〉

再使用禁止

**【使用方法等】

ブラケットもしくはチューブ等のフック、又は直接ブラケットに引っ掛けて空隙閉鎖等に使用する。また、ストレートシューターガンや鉗子等で取り付けるものもある。

**【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 口腔内ではずれ、脱落することがあるので使用には十分注意すること。またその際に誤飲しないよう注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

直射日光及び高温を避け、室温が一定の場所で保管すること。

(2) 有効期間

1年半を目安に使用すること[自己認証(自社データ)による]。

*【形状・構造及び原理等】

(1) 形状



mini スティック
リガチャータイ

カラーセルリガ
チャージャーディスペンサー

E・チェーン

(2) 構造

リング状になっており、フックなどに引っ掛けて使用する。

(3) 原理

フックなどに引っ掛けて使用し、エラストマーが元に復元しようとする力が歯の移動を行う。

(4) 原材料

本品は以下の原材料で構成する。

原材料：ポリウレタン、

着色原料（グレー）：カーボンブラック、
黒酸化鉄、酸化チタン

着色原料（ゴールド）：黄銅

着色原料（シルバー）：アルミニウム、
ウレタンエラストマー

着色原料（その他の色）：法定色素

【使用目的又は効果】

弾性材料で歯の移動、矯正装置の保持等に用いる。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国