

## 再使用禁止

## TP ライトオン

### \*\*【禁忌・禁止】

#### <適用対象（患者）>

- ・本品の成分に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。

#### <使用方法>

- ・再使用禁止

### \*【形状・構造及び原理等】

#### (1) 形状



左の写真は、TP ライトオンペーストシリンジ3本入りのキットを示す。

#### (2) 構造

構成品として TP ライトオンアクチベーター、TP ライトオンペースト、TP ライトオンエッチング液からなり、二品目以上の構成品を組み合わせる構成とする。

#### (3) 原理

エッチング硬化、機械的性質、接着性を利用して行う歯列矯正器具の表面と歯牙表面を接着するものである。

#### (4) 原材料

本品は次の成分で構成する。

成分名：石英粉、Bis GMA、ポリメタクリル酸メチル、過酸化ベンゾイル、ヒドロキノン、メタクリル酸メチル、ジエチルアミン、リン酸、ポリビニルアルコール、青色一号

### 【使用目的又は効果】

本品に使用されるエッチング液は、歯のエナメル質を溶かし、凹凸を作る。アクチベーターはペーストを固める効果があり、そのペーストを使用してブラケットと歯面を接着することを使用目的としている。

### 【使用方法等】

- ① フォームペレットに TP ライトオンエッチング液を浸し、歯面が脱灰されて不透明な白色状態を呈するまで接着すべき歯面に軽くたたくように塗布する。約 45 秒。
- ② その後、洗浄乾燥させた歯牙の脱灰面と矯正装置との接着面に備え付けの使い捨てブラシで薄め（厚さ 0.5mm 以下）に TP ライトオンアクチベーターを塗布する。
- ③ その後 30 秒から 45 秒待ち、接着すべき歯面又は装置の接着面のいずれかに TP ライトオンペーストを薄めにスパチュラで塗布する。TP ライトオンペースト（シリンジ入りペースト）の場合は矯正装置の接着面に直接適用する。塗布後、矯正装置を軽く歯面に対応し接着する。

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 重要な基本的注意

- ① 使用により、過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ② 使用時に液だれ、ペーストだれすることがあるので、使用の際には十分注意すること。また誤飲、口腔内、皮膚への接触等には十分注意すること。万が一、皮膚や目等についた場合には速やかに対処し医師の診断を受けさせること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### (1) 保管方法

高温・多湿を避け、冷所に保管すること。

#### (2) 有効期間

製品に記載されている使用期限(USE BEFORE)までに使用すること。[自己認証（自社データ）による]

例：USE BEFORE：2017-09 は 2017 年 9 月までの使用期限を示す。

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(1) 製造販売業者

有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン

TEL:03-5961-3800 FAX:03-5961-3805

(2) 製造業者

TP Orthodontics, Inc.

ティーピー・オーソドンテックス社

アメリカ合衆国